



TRADE+MED



+385 1 2444 646



info@trademed.hr



www.trademed.hr



TradeMed d.o.o.
Trg J.F. Kennedy 6b
10000 Zagreb

SomTabs – tablete za čišćenje preporučuje SomnoMed® za nježno i temeljito čišćenje SomnoMed® zubne udlage.

SomTabs tablete temeljito čiste teško dostupna područja Vaše zubne udlage.

Zubnu udlagu **uvijek** očistite odmah ujutro nakon što ju izvadite iz usne šupljine.




Otopite tabletu SomTabs u toploj vodi u posudi predviđenoj za čišćenje.

Približna toplina vode neka bude 35 °C.

Nikada ne stavljajte svoju udlagu u vruću vodu kako se ne bi oštetila jer to poništava jamstvo zubne udlage.



Nakon što ste otopili tabletu SomTabs u posudi predviđenoj za čišćenje, pažljivo stavite svoju zubnu udlagu i ostale dijelove. Svi dijelovi moraju biti potpuno uronjeni u otopinu za čišćenje.

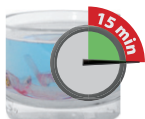

Nakon 15 minuta, izvadite udlagu te ostale dijelove iz otopine za čišćenje.

Pazite da ne izgubite sitne dijelove!



Potom četkicom za zube ili četkicom za čišćenje temeljito išetkajte zubnu udlagu te isperite hladnom vodom.



Operite i osušite čistim ručnikom preostale metalne dijelove te posudu za čišćenje.



Nemojte koristiti pastu za zube pri čišćenju jer abrazivni sastojci mogu oštetiti Vašu zubnu udlagu.



Zaštitite svoju SomnoMed® zubnu udlagu od izravne sunčeve svjetlosti.

OPREZ:



Ne stavljajte SomTabs tablete u usta!



Ne koristite SomTabs tablete kao sredstvo za ispiranje usne šupljine!